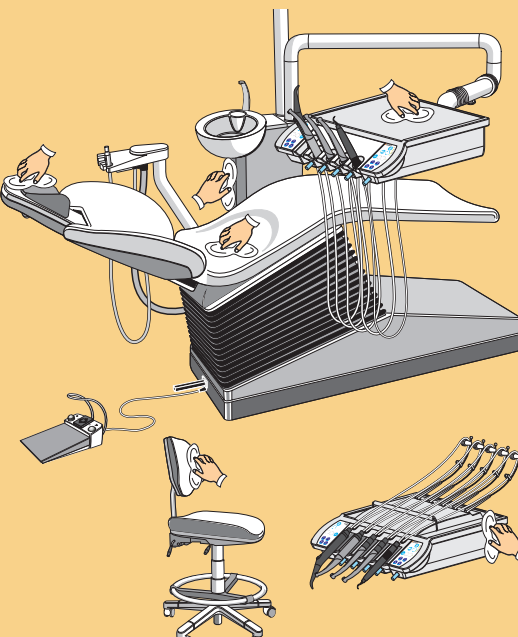
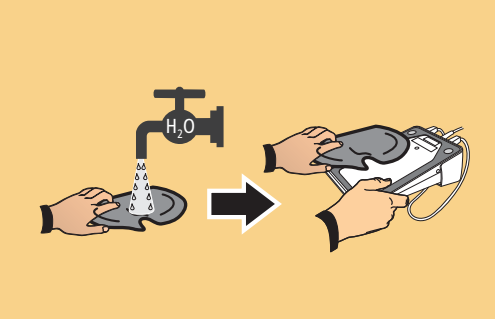
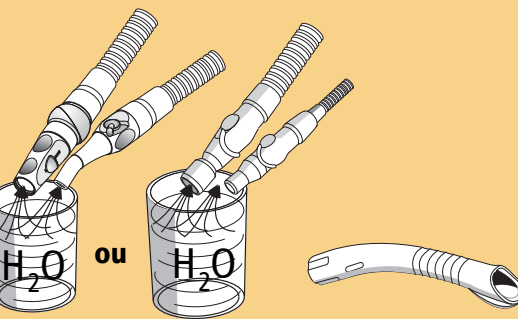
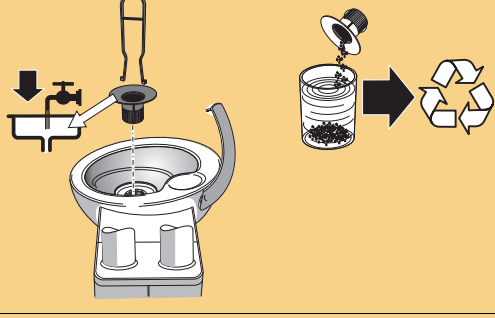
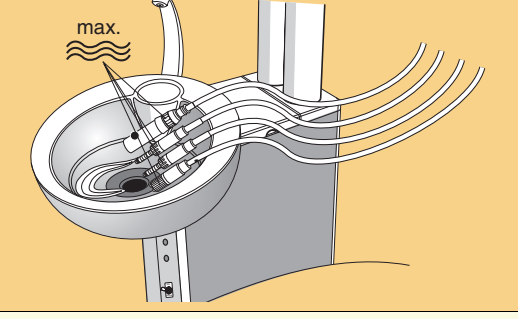
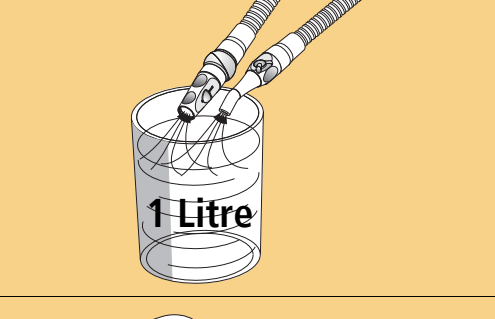
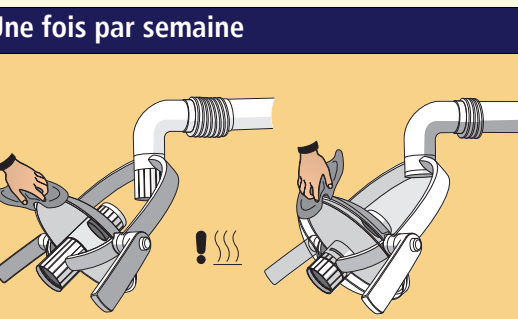

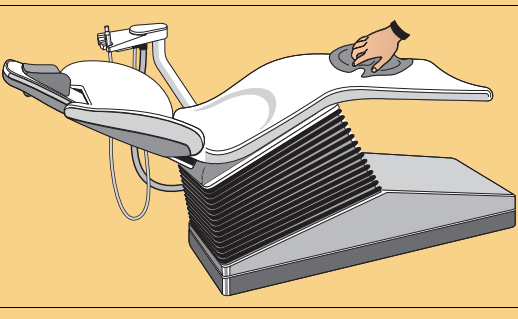
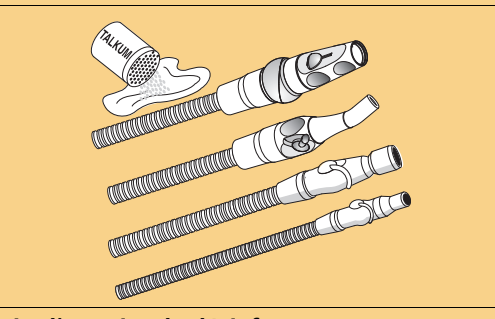
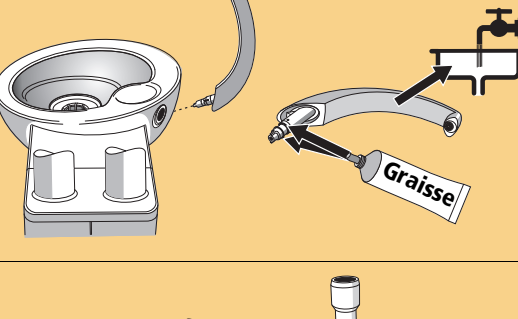
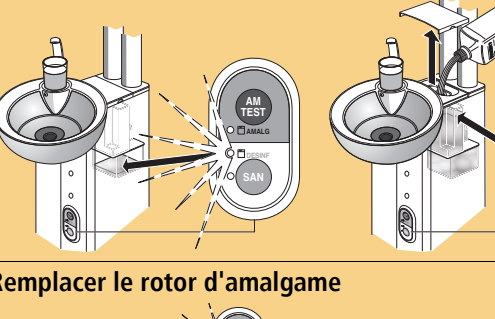
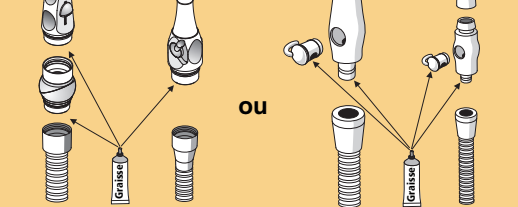
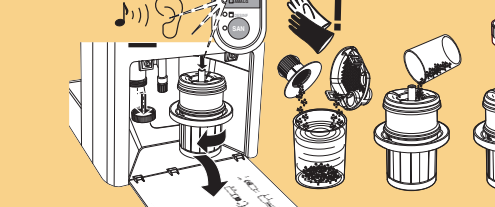
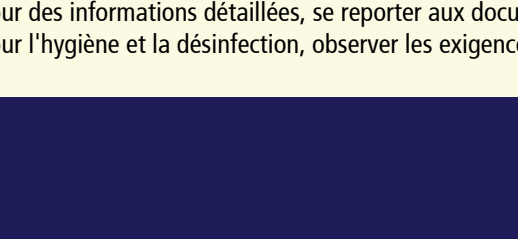



Planning d'entretien et de nettoyage pour unités de traitement C8+

Une liste actualisée en permanence des produits d'entretien, de nettoyage et de désinfection agréés peut être consultée sous la REF 59 70 905 depuis la page d'accueil Sirona sur Internet à l'adresse : ⇒ www.sirona.com

Après chaque patient		Chaque jour	
	<p>Nettoyer et désinfecter les surfaces et les coussins</p> <p>⚠ ATTENTION Utiliser uniquement des produits de nettoyage et de désinfection agréés par Sirona !</p>		<p>Nettoyer la commande au pied</p>
	<p>Nettoyer le crachoir</p> <p>⚠ ATTENTION Utiliser uniquement des produits de nettoyage et de désinfection agréés par Sirona !</p> <p>Ne pas utiliser de nettoyants domestiques ni de poudres à récurer !</p>		<p>Retirer le collecteur d'or et le nettoyer</p> <p>Collecter les résidus d'amalgame dans un récipient fermé contenant de l'eau. ATTENTION ! Ne pas vider les résidus d'amalgame dans le crachoir. Pour rincer, verser 1 litre d'eau dans le crachoir.</p>
	<p>Aspirer un grand verre d'eau froide notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ après des interventions chirurgicales ■ après utilisation de H₂O₂ ■ au moins toutes les 60 minutes pour les traitements de longue durée <p>Pour éviter le reflux, utiliser la canule d'aspiration avec arrivées d'air auxiliaires.</p>		<p>Aspirer du produit de désinfection</p> <p>⚠ ATTENTION Utiliser uniquement des produits de nettoyage et de désinfection agréés par Sirona !</p>
	<p>Fonction de purge</p> <p>Rincer les conduits d'eau des instruments utilisés de l'élément praticien.</p>		<p>Nettoyer le filtre</p> <p>Collecter les résidus d'amalgame dans un récipient fermé contenant de l'eau. ⚠ ATTENTION Ne pas jeter les résidus d'amalgame dans le crachoir.</p>
Une fois par semaine		Tous les mois ou en fonction des besoins	
	<p>Nettoyer le réflecteur de la lampe d'opération</p> <p>⚠ ATTENTION Pour le nettoyage, utiliser de l'alcool à 70 % !</p> <p>ATTENTION ! Le réflecteur doit être froid.</p>		<p>Assainissement</p> <p>Pour réduire le biofilm au sein du système d'alimentation en eau fraîche de l'unité de traitement</p>
	<p>Entretien et nettoyage des coussins</p> <p>⚠ ATTENTION Utiliser uniquement des produits de nettoyage et d'entretien pour coussins agréés par Sirona. L'éponge de nettoyage du produit FD360 ne doit pas être utilisée sur la sellerie Lounge.</p> <p>Observer minutieusement le manuel du produit de nettoyage et de désinfection.</p>		<p>Cordons d'aspiration</p> <p>Lorsque les surfaces des flexibles sont devenues collantes en raison de la fréquence d'utilisation des produits de désinfection, essuyer les flexibles avec du produit à vaisselle, et si nécessaire, les poudrer légèrement avec du talc.</p>
	<p>Retirer et nettoyer le bec de remplissage ou, le cas échéant, l'adaptateur hydrocolloïde et graisser les joints toriques</p>		<p>Faire l'appoint de désinfectant!</p> <p>DENTOSEPT P, 6x1 litre: REF 33 18 156 in Canada/Japan/USA: DENTOSEPT P, 6x1 litre: REF 59 69 535</p>
	<p>Séparer les pièces d'aspiration au niveau de l'articulation, les nettoyer et graisser les raccords</p> <p>⚠ ATTENTION Utiliser uniquement les produits agréés par Sirona !</p>		<p>Remplacer le rotor d'amalgame</p> <p>ou moins 1 fois par an</p>

Pour des informations détaillées, se reporter aux documents „Entretien et nettoyage par l'équipe du cabinet”.
Pour l'hygiène et la désinfection, observer les exigences et les recommandations nationales (p. ex. RKI, ADA, CDC etc.).